

Biologix

Guia de uso: Aplicativo



1

Baixar o app da Biologix

Para baixar o aplicativo Biologix, basta ir na loja de seu celular (Android: Google Play e IOS: App Store) e instalar.

Especificações necessárias:




- O aplicativo Biologix deve ser instalado em um smartphone com acesso à internet (Wi-fi, 3G, 4G, etc...).
- Android: Sistema Android a partir de 5.0
- IOS (Apple): Sistema IOS a partir de 11.0

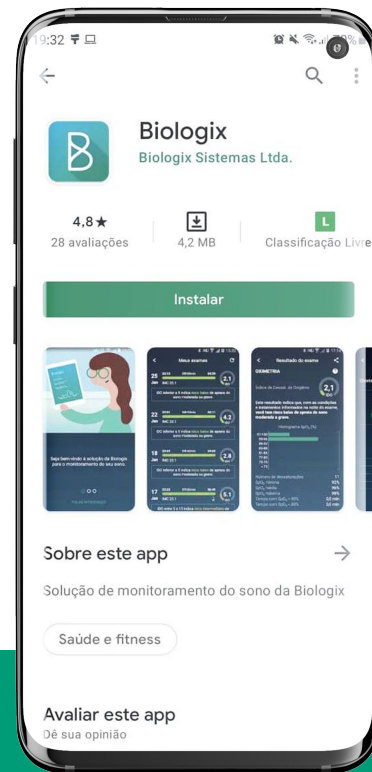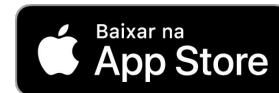

2

Criar conta no aplicativo


Após baixado, abrir o aplicativo e dar início ao cadastro. Utilize seu CPF como login e preencha todos os campos com seus dados.

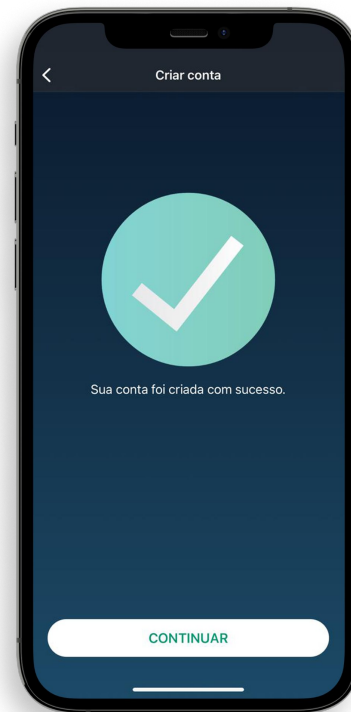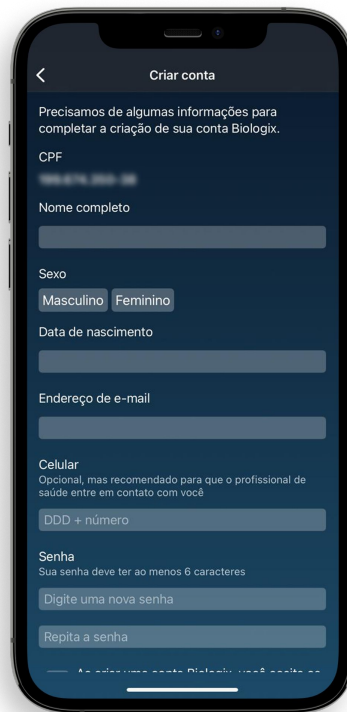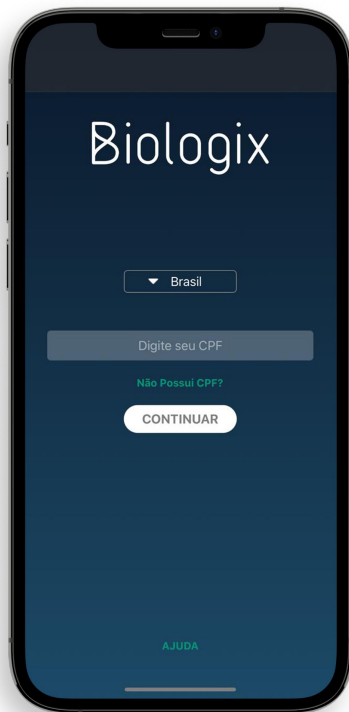


3

Realizando exame


Após realizar o login com seu CPF e senha cadastrado, para iniciar o exame, basta pressionar:
“Novo exame” →
Autorização →
Responda o questionário

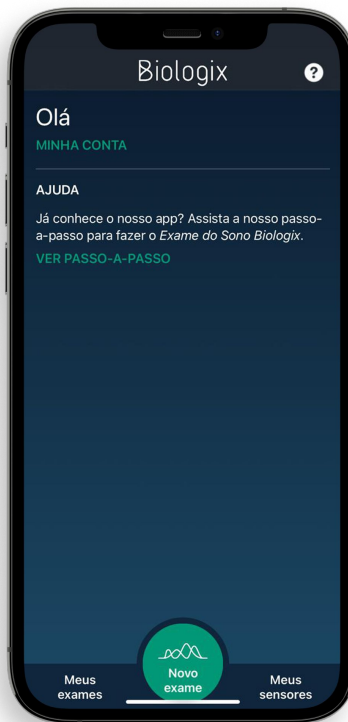

Assim que logado em sua conta, para dar início ao exame, pressione o botão verde “novo exame”.

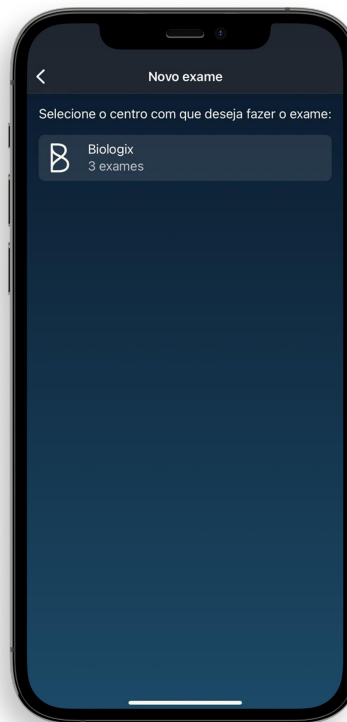

Em seguida, clique na autorização emitida pelo centro credenciado responsável pelo seu exame.

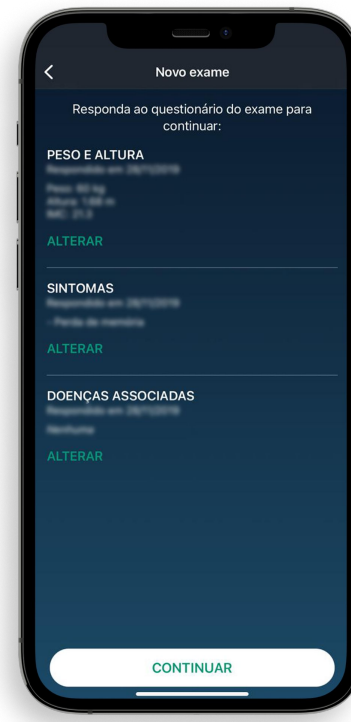

O próximo passo é preencher todos os campos do questionário. Lembre de colocar os dados corretamente.

3

Realizando exame

Condições e tratamentos




Posicionar o sensor



Tela pré-exame



Na tela de condições e tratamentos, pressione apenas as condições correspondentes à sua situação antes de fazer o exame.

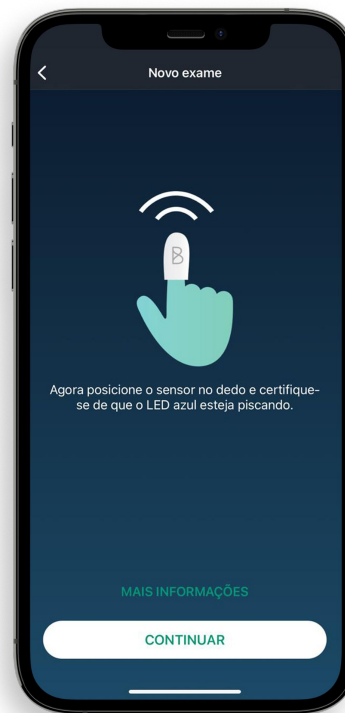

Posicione o sensor no dedo corretamente, verificando se a luz azul está piscando, indicando que o sensor está ligado.



A próxima tela é a de pré exame, e mostra os parâmetros do sensor antes de iniciar o exame. Certifique-se de clicar em iniciar exame.

Exame iniciado:

- Manter o smartphone próximo do sensor durante todo o exame.
- Se precisar pausar o exame por qualquer motivo, retire o sensor do dedo sem mexer no aplicativo.
- Ao recolocar o sensor no dedo o exame será retomado.
- Se o sensor ficar fora do dedo por mais de 30 minutos, o exame será automaticamente encerrado, mas será necessário concluir o exame no aplicativo.
- Lembrando que é necessário possuir conexão com a internet para iniciar e concluir o exame.



5 Concluindo o exame

- Ao acordar pela manhã, o(a) paciente deve acessar o aplicativo e pressionar CONCLUIR. Nesse momento é necessário que o smartphone esteja conectado à internet.
- Um exame só será considerado válido quando sua duração for de no mínimo 4 horas.
- Retirar o sensor do dedo
- Guardar o sensor no estojo



Informações adicionais



Nenhum led aceso:

indica que o sensor está desligado;

Led azul:

indica que o sensor está ligado e aguardando a comunicação com o aplicativo Biologix.

Led verde:

indica que os dados estão sendo medidos adequadamente


Led amarelo:

indica que os dados não estão sendo medidos adequadamente, provavelmente devido à movimentação excessiva do dedo.


Led vermelho:

indica que a bateria está descarregada e possui menos de 10% de sua capacidade total. Indica que a bateria está sendo carregada.

Qual é a forma correta de inserir o sensor no dedo?

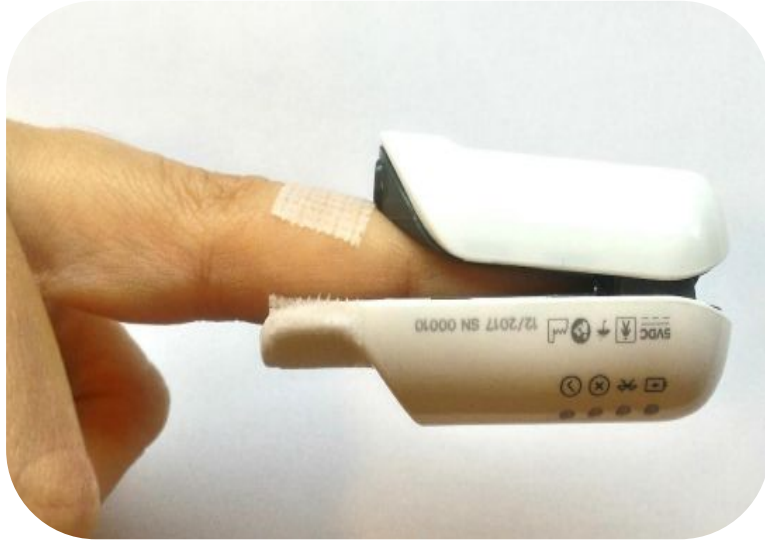

Insira o sensor no dedo com os leds de indicação voltados para a palma da mão, como mostra a imagem acima

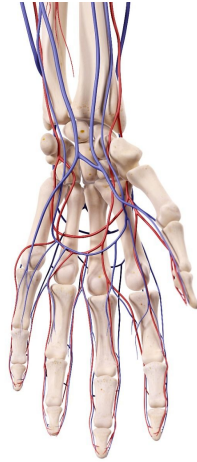

Dicas de utilização e contra-indicação

- Condições clínicas como hipotermia, vasoconstrição, hipovolemia, doença periférica e anemia.
- Utilizar nos dedos médio, anelar ou indicador por conta da capilaridade.
- Sensor com bateria inferior a 50% não inicia exames.
- Esmalte ou unhas artificiais (led emissor e receptor).
- Movimentação excessiva do dedo.
- Prender a fita de maneira muito apertada.
- Feridas, queimaduras e erupções.



Como higienizar o sensor após cada uso?

- Limpe a superfície exterior do Oxistar BX1 com um pano macio umedecido com álcool 70%;
- Limpe a parte interna do Oxistar BX1 com um pano macio umedecido com álcool 70%;
- Não mergulhe qualquer parte do Oxistar BX1 em líquido;
- Não derrame líquido sobre o Oxistar BX1;
- Não deixe que líquidos entrem no Oxistar BX1;
- Para remover os resíduos deixados pela fita adesiva, utilizar um pano macio umedecido com removedor de uso em limpeza doméstica. Esfregar o pano nos resíduos até sua completa remoção.
- Não utilize o Oxistar BX1 enquanto ele não estiver totalmente seco; **ATENÇÃO:** Nunca realize o procedimento de limpeza enquanto o Oxistar BX1 estiver no processo de carregamento da sua bateria interna, pois, choques elétricos poderão ocorrer. Antes de limpar, desconecte o Oxistar BX1 do carregador ou da porta USB energizada. O Oxistar BX1 é um dispositivo reutilizável fornecido e utilizado sem necessidade de esterilização. Recomenda-se que o Oxistar BX1 seja limpo a cada 3 utilizações, seguindo as instruções abaixo:
- Nunca utilize materiais abrasivos ou produtos de limpeza erosivos (acetona ou produtos à base de acetona);
- Nunca esterilize o Oxistar BX1 por autoclave, pressão ou gás.

Dicas Ronco

Para aumentar a eficácia da gravação do ronco, é importante se atentar para os seguintes fatos

1

O ronco é gravado pelo próprio celular. Por isso, é importante que este seja posicionado próximo ao paciente – a cerca de 1 metro distância. Evite deixar o celular embaixo de travesseiros ou outros objetos que possam bloquear o microfone do aparelho.

2

A análise do ronco é feita com uma inteligência artificial para evitar que os demais ruídos ao longo do exame sejam classificados como roncos. Ainda assim, é importante reduzir ao máximo os ruídos do ambiente, como televisão, ventiladores, ar-condicionado etc. Isto torna a análise do ronco ainda mais precisa.

3

Se há mais de uma pessoa que ronca no quarto, o aplicativo não conseguirá distinguir automaticamente o ronco de uma pessoa do de outra. A sugestão nestes casos é dormir separadamente na noite que será realizado o exame.

4

O ronco é impactado por pelas condições do paciente no momento do exame, como nariz congestionado, ingestão de álcool, posição predominante durante o sono etc. Por isso, é importante avaliar o ronco por mais de uma noite para ter uma conclusão mais precisa.

5

No iPhone, existem algumas exigências específicas. A gravação é interrompida quando a bateria do celular é menor que 20% e a tela do celular não deve ser bloqueada – ela irá escurecer automaticamente.

6

É possível ouvir amostras dos roncos pelo próprio aplicativo ou pelo portal Biologix, dentro da tela de visualização do laudo. Há uma amostra de 60 segundos a cada 30 minutos de exames.



**Em caso de dúvidas,
entre em contato via:**

E-mail: relacionamento@biologix.com.br

Telefone/Whatsapp corporativo: (11) 3031-1353

Biologix